


CORRETTA VESTIZIONE DELLA MASCHERINA

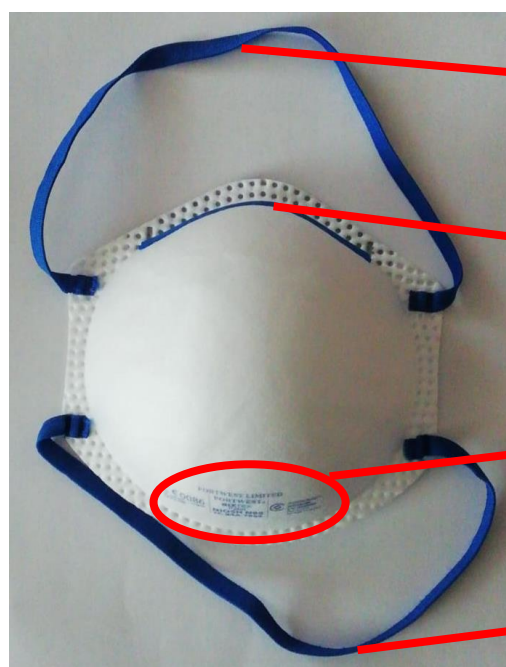

ELASTICO SUPERIORE

STRINGINASO


MARCATURA

ELASTICO INFERIORE

OPERAZIONI PRELIMINARI

- A) Le mani e il viso devono essere puliti
- B) Il viso deve essere ben rasato (la barba non permette adeguata tenuta alla mascherina)
- C) Verificare che la mascherina sia integra e nella confezione originale
- D) Togliere eventuali occhiali che potrebbero interferire con la vestizione della maschera

VESTIZIONE

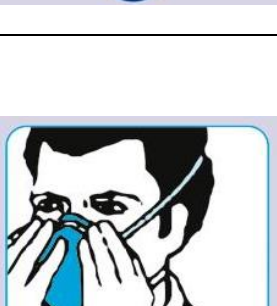	Prelevare la mascherina e tenerla sul palmo della mano con lo stringinaso verso le dita e gli elastici liberi sotto la mano
	Posizionare la mascherina sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto (il naso all'interno della conchiglia)
	Tenendo in posizione la mascherina, posizionare l'elastico superiore sulla nuca (sopra le orecchie) e quello inferiore sotto le orecchie. Si deve sentire la maschera ben posizionata sul viso.
	Posizionare le dita (indice e/o anulare) di entrambe la mani sulla parte superiore dello stringinaso in corrispondenza del naso. Muovere le dita verso le estremità dello stringinaso in modo da modellare lo stringinaso sul proprio naso e far aderire la mascherina al viso senza lasciare passaggi (non si devono avvertire tensioni o pieghe nei punti di tenuta lungo il bordo)
	Verificare la tenuta del respiratore PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE : • coprire con entrambe le mani il respiratore, tenendolo in posizione • inspirare rapidamente all'interno del respiratore; si deve avvertire una depressione e l'aria non deve entrare dai bordi. Espirare rapidamente all'interno del respiratore, si deve avvertire una pressione interna e l'aria non deve fuggire dai bordi • Nel caso di perdite, aggiustare la posizione del respiratore; • Ripetere le prova di tenuta ogni qualvolta si abbia l'impressione di spostamento del facciale dal volto.